

1万人以上の ユーザーが実感しました

- ◆ 人前で話す機会が多い仕事をしているのでバネが目立たないスマートデンチャーはとても嬉しい。
(香川県Y.さん)
- ◆ 夫婦で話し合っ、思い切ってスマートデンチャーにしました。友人の評判も大変良いです。主人もスマートデンチャーを入れる予定です。
(福岡県Mさん)
- ◆ 運動中に前歯を折ってしまいました。若いのでインプラントの選択肢もありましたが手術が怖いので、費用の面でスマートデンチャーにしました。今では歯がなくなったショックを忘れさせてくれる大切な宝物です。
(兵庫県T.Oさん)
- ◆ 他人の目を気にしなくなっただけでなく、しっかり咬め、好きな煎餅もバリバリ食べられるようになり、本当によかったです。
(愛知県S.Nさん)
- ◆ 今までしていた入れ歯と違い、バネと歯との間に食べ物が入らないので、食べやすくなりました。
(埼玉県Yさん)

※使用感には個人差があります。

◆その他ご不明な点は当院スタッフまで

スマートデンチャーの 取り扱いは簡単!

以下のことを守っていただければ
未永くお使いいただけます。

●スマートデンチャーの着脱方法

入れる時は、はめる場所にそつとあわせ、バネの部分を指で優しく押さえて入れます。はずす時はバネを外に軽く開いて少しずつ外します。



- 食後はやわらかい歯ブラシを使って汚れを軽く洗い流してください。
- 外して保管する際は、入れ歯ケースに保管するだけでOK。水につけておく必要はありません。
- 80℃以上の熱湯に浸けない限り、ほぼ変形することはありません。
- 洗浄にはアルカリ性のもの以外をご使用下さい。「入れ歯爽快」がおすすめです。

歯石除去!
除菌消臭!



あなたの笑顔を待っている人がいます!



はじめませんか? 入れ歯のエステ スマートデンチャー



保険の部分入れ歯だと…

はずすたびに、バネをかける歯を傷つけてしまいそう…



金具が見えるから話すとき手をあててしまう…



入れ歯特有のにおいがする…
バネが気になって食べにくい…



…どう、めきらめてませんか？

Go!

スマートデンチャーなら…

さどられませんか！



Point 2

奥歯に入れる場合は、しっかり咬めるようにするためにも、見えない部分を金属で補強したものをおすすめします。(金属の支えがないと入れ歯がたわみ、痛みを感じる、割れる等のトラブルが生じやすくなります)



Point 1

歯科用強化プラスチックのバネで、入れ歯が動かないようしっかりと支えてくれます。



Point 3

金属部分にチタンを使用したりイオンコート加工することで身体に優しい入れ歯にできます。



昨日まで
うつむいていた私…

でも今日からは**自信**を持って**笑えます!**

